

淳碩 液態凝膠座墊



TS-LC07-4040

TS-LC07-4540

臀型減壓 冰涼感 免調整

適用於預防及減少壓力型壓瘡狀況

Cushion

產品保險最高1000萬

保固二年



TS-LC07-4040
TS-LC07-4540

淳碩 液態凝膠座墊

液態凝膠搭配臀型底座泡棉複合座墊特點

臀型減壓分布 Pressure Dispersion

根據臀型人體工學設計出最好的釋壓分散形狀。

複合式結構 Composite Structure

上層區域為柔軟流動凝膠作良好的壓力緩衝分佈，下層則由高品質高密度 PU 泡棉作穩定支撐基底，適形減壓包覆性夠。

免調整 No Installation

不需作調整即能使用。

壓瘡防護 Pressure Ulcer Protection

提供優秀減壓震模組，適用於預防和減少壓力型褥瘡的狀況。

耐用性極佳 Excellent Durability

非人為破壞下本體可使用 2 年以上之耐用度。

減少聚熱 Stable Temperature

液態凝膠可增加冰涼感並減少座墊與人體之間相互聚熱。

穩定緩衝分隔 Stable Buffer

M 型分隔凝膠區可穩定壓力吸收面，降低左右搖晃不平衡位移狀態，讓臀部享有高度承載及緩衝空間。

機能座罩 Functional Grade Cover

座罩上層接觸面為防水透濕、四向拉伸、阻燃機能布料；底層為優異的止滑墊，防止使用者隨著座墊而有滑落的危機；側邊為透氣網布幫助散熱。

固定裝置 Fixed Position

側邊車上寬版織帶加扣環可環繞椅背扣上作防掉落保護裝置。

觸底保護佳 Bottoming Out Protection

中間柔軟凝膠模組大面積分佈可防止“吊床效應”結構，大於 1/2 面積分佈於 PU 底座壓區間，減少最大壓力點被集中，PU 高密度一體成形的發泡海棉底座有一定壓縮高度限制，防止觸底形成之風險。

優異吸震能力 Excellent Shock Absorption


有如緩衝反作用力能力，以保護使用者。

適用於身體部位需減壓狀態

Applicable to Pressure Relief

身體部位需要釋壓減壓及增加坐下時的舒適感皆可使用。

複合式結構 Composite Structure

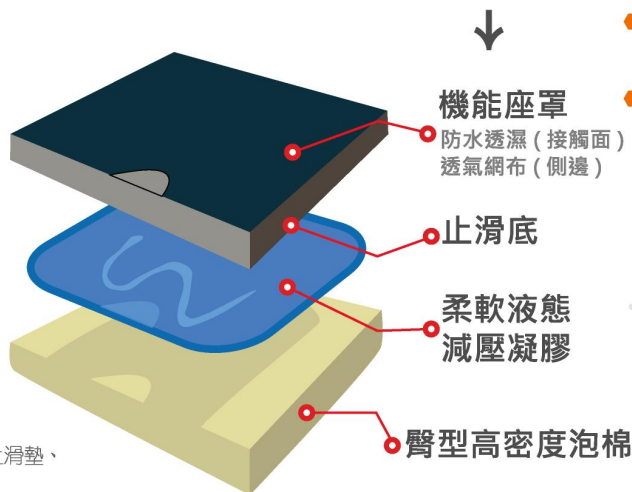

使用重點


- 在預防壓瘡或褥瘡的發展第一步：需於每兩小時內或遵從醫生規定時間內改變姿勢以減少局部的壓力點。
- 而當坐在此座墊時，重要的是要能常常自行上下撐起，或者儘可能固定時間多次被抬起或左右搖動，可以改變壓力避免骨突處附近部位持續被壓迫。
- 如果壓力潰瘍惡化，儘量減少坐著時間並務必和專業醫師或護理人員請教坐姿並重新評估使用時間。
- 無論坐在輪椅或椅子，使用時務必確保腳穩定支撐在輪椅腳踏板上，腳凳，或地板。




▲醫療器材分類為第一等級
醫材分類分級代碼：O.3175 ▲

臀型減壓分布 Pressure Dispersion

證明可有效減輕臀部壓力負擔

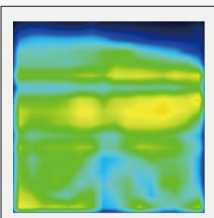

◆使用TS-LC07系列 臀部壓力測試圖

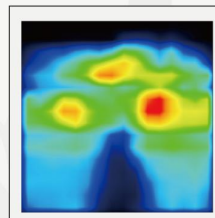

◆未使用任何緩衝座墊臀部壓力測試圖

型 號	座墊總尺寸	液態凝膠尺寸
TS-LC07-4040	16" x16" x2.75" (40x40x7cm)	40x23xH2.6cm (>1/2面積)
TS-LC07-4540	18" x16" x2.75" (45x40x7cm)	45x23xH2.6cm (>1/2面積)

- 座墊本體 (含:液態凝膠/高密度適形泡棉底座/固定織物)
- 專用座罩 (PU Coating防水透濕彈性布/透氣網布/止滑底)
- 座墊覆套具延展性
- 最大載重: 130Kg
- 僅保固座墊本體於購買後正常使用下之服務為期兩年。



製造商名稱：**淳碩科技股份有限公司**
製造商地址：新北市新店區民權路130巷3號4樓

“淳碩” 浮動坐墊 (未滅菌)

服務專線：0800-820168
www.medical-truesource.com/tw



經銷商