



TRUE SOURCE
for HealthCare

舒適・穩定・安心照護・

專利開發

Rubber Air Cushion

淳碩 橡膠 (分區型) 氣囊氣墊座

H5.5cm TS-AR55-4040

兩區調整 TS-AR55-4540



H8.5cm TS-AR85-4040-4

四區調整 TS-AR85-4540-4

Pressure Relief

用於減少皮膚潰瘍(褥瘡)的發生率

Select Compartment Type



保固: 兩年(長照) / 三年(身障)

產品保險最高1000萬

符合身障長照政府補助



”淳碩”浮動坐墊(未滅菌) 衛部醫器製壹字第 006666 號 北衛器廣字第 11505012 號

專利新型證號:M659272
複數區域壓力可調式氣囊座墊

“淳碩”浮動坐墊(未滅菌)

橡膠(分區型) 氣囊氣墊座

Rubber Air Cushion Select compartment type

使用重點

- 在預防壓瘡或褥瘡的發展第一步：需於每兩小時內或遵從醫生規定的時間內改變姿勢以減少壓力點。
- 而當坐在此座墊時，重要的是須能常常自行上下撐起，或者儘可能於固定時間內多次被抬起或左右搖動，可以改變壓力避免骨突處附近部位持續被壓迫。
- 如果壓力潰瘍惡化，須儘量減少靜坐時間並務必與專業醫師或護理人員請教坐姿，並重新評估使用時間。
- 無論坐在床邊的椅子或輪椅，使用時務必確保腳穩定支撐在地板上、腳凳、或輪椅的腳踏板上。

TS-AR55-4040/TS-AR55-4540/TS-AR85-4040-4/TS-AR85-4540-4

舒適減壓 Comfortable Pressure Relief

氣囊數量為64或72，顆數多而密集，讓氣囊獨立接觸點變多，使壓力分散能力提升，服貼感和適形性增加，減壓能力及舒適程度明顯卓越。

穩定支撐 Stable Support

扁平狀氣流道的設計於局部施力時，讓氣囊之間平順地通過氣流增進使用穩定性。

5.5cm&8.5cm高度選擇 5.5cm&8.5cm height options

依據使用者需求配合專業評估作不同高度選擇。

專利分區開關 Patented Partition Switch

切換互通及不互通的90度旋轉開關以直覺式控制、簡單操作、體積小為考量選用金屬材料增加氣密能力及耐用度。四區由前方及左右調整控制。

方便調整提供支撐 Improve Adjusted

調整時不須上下起身之便利。

45度充洩閥 45 degree Valve

45度斜角充洩閥位置增加調整時方便性並減少充洩閥被擠壓於座位邊框的機率。

優異吸震能力 Excellent Shock Absorption

緩衝反作用力能力以保護使用者。

減少聚熱 Stable Temperature

氣囊多顆獨立外型可使氣流增加益於空氣流動降低熱流，清爽不易悶熱。氣囊頂端形狀較平坦，使用上比較舒服。

調整容易 Easy to Adjust

充洩閥轉動處有長6mm交叉斜紋設計，易於手握來調整座墊氣室的軟硬度。

耐用 Durable

座墊採用新科技橡膠材質Neoprene-CR Rubber,中文為氣平橡膠。具富彈性、柔軟度佳、手感細膩特性。

安心 Peace of Mind

座墊使用原料經過REACH/SVHC含有調查表，對人類有害的高度關注物質含量顯示為No。

雷減壓狀態 Applicable to Pressure Relief

身體部分需要釋壓減壓及增加坐下時的舒適感皆可使用。

機能座罩 Function Grade Cover


座墊保護罩其上層採用透氣四向高級彈性Nylon布，服貼於氣囊表面增加適形性。透氣涼爽。下層則為優異防滑層以減少使用者隨著座墊滑落的風險。有手把可輔助移位及攜帶拿取之便利性。

依需求擺放 Place as Needed

擺置方式可依需求分左右或前後方式。

簡易充氣 Easy to Inflate

手持打氣筒操作簡單且不費力。

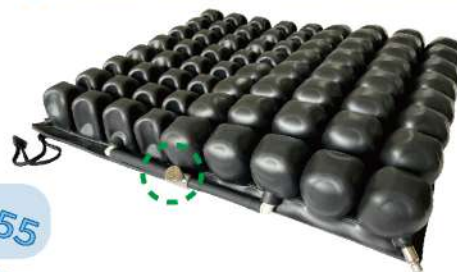

高5.5cm AR55

兩區調整




高8.5cm AR85


四區調整

臀型減壓分布 Pressure Dispersion

證明可有效減輕臀部壓力負擔

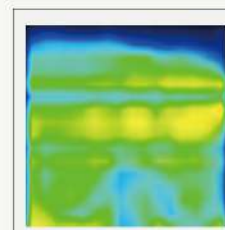

● 使用AR55系列 臀部壓力測試圖

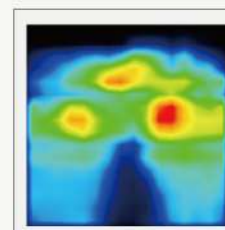

● 未使用任何緩衝坐墊臀部壓力測試圖



左右邊各自調整軟硬度



左右邊空氣互通

- 具有分散壓力功能
- 座墊保護罩 接觸面：四向透氣彈性布，具延展性
- 具有切換全區連通及分區壓力調節的功能。
- 最大載重：130KG (公斤)
- 只保固座墊本體於購買後，正常使用下之服務為期兩年或三年依申請之補助規範。

▲醫療器材分類為第一等級
醫材分類分級代碼：O.3175▲

型號	分區	重量	尺寸	高度	氣囊數量	座墊材質
TS-AR55-4040	兩區	(大約)公斤 1.65	40X40cm 座寬x座深	5.5cm(2.16")高於2吋	64顆(8*8)>20pcs	氣平橡膠 Neoprene-CR Rubber
TS-AR55-4540		1.85	45X40cm 座寬x座深		72顆(9*8)>20pcs	
TS-AR85-4040-4	四區	(大約)公斤 2.17	40X40cm 座寬x座深	8.5cm(3.34")高於2吋	64顆(8*8)>20pcs	
TS-AR85-4540-4		2.33	45X40cm 座寬x座深		72顆(9*8)>20pcs	



TRUE SOURCE
for HealthCare

醫療器材商名稱：淳碩科技股份有限公司 服務專線：0800-820168

醫療器材商地址：新北市新店區民權路130巷3號4樓 www.medical-truesource.com/zh-hant



經銷商