




舒適 穩定 安心照護

淳碩 蜂巢式固態凝膠座墊

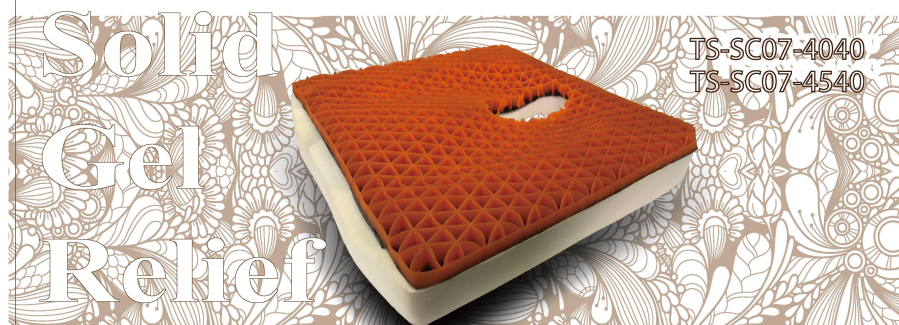

TS-SC07-4040
TS-SC07-4540

Solid Gel Relief Cushion



臀型減壓 不聚熱 免調整

避開痔瘡位置點

淳碩 蜂巢式固態凝膠座墊

固態凝膠搭配臀型底座泡棉複合座墊

座墊特點

蜂巢式彈性固態凝膠 Honeycomb Elastic Solid Gel
蜂巢式結構可均勻分散壓力並降低壓瘡發生，並根據人體工學設計出最佳的蜂巢分散形狀。

舒適減壓 Comfortable Pressure Relief
採複合式座墊，蜂巢式固態凝膠，作透氣減壓保護，PU 泡棉底座具有穩定及定型支撐位置。

免調整 No Installation
複合式一體成型結構，不需作調整即可使用。

避開痔瘡位置點 Hemorrhoid point avoidance
於痔瘡處位置點避開，可避免此處產生壓瘡機會。

耐用性極佳 Excellent Durability
非人類級硬下本體可使用 2 年以上之耐用度。

不聚熱 Stable Temperature
接觸面有蜂巢形狀結構可產生空氣對流，減少使用者與人體之間相互聚熱。


穩定支撐 Stable Support
可感受到穩定支撐且穩定的壓力吸收面，將左右搖晃或不平衡形狀狀態。

機能座罩 Functional Grade Cover
座罩上層為蜂巢式防水透氣，且可拆卸，且蜂巢式透氣材料，下層為蜂巢式的止滑墊，使用者可避免座墊而滑落的危險。

觸底保護佳 Bottoming Out Protection
平均大於 1/2 面積分布於 PU 泡棉底座，減少最大壓力點集中，PU 高強度泡棉底座有一定量的高密度泡棉，防止漏氣形成之漏氣。


優異吸震能力 Excellent Shock Absorption
有吸震及反作用力能力，以保護使用者。

適用於一般雷減壓狀態
Applicable to Hips for Pressure Relief
身體部位需要轉壓減壓及增加坐下時姿勢舒適者可使用。

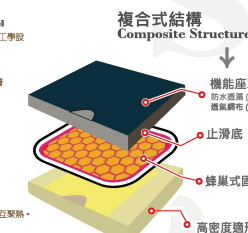

使用重點

- 在預防壓瘡或褥瘡的發展第一步，需於每兩小時內或遵從醫生指示時間內改變姿勢以減少局部壓力點。
- 而當坐在此座墊時，重要的是要經常進行上下撐起，或者儘可能固定時間多次後起或左右移動，可以改變壓力避免褥瘡附近部位持續壓迫。
- 如果壓力持續高，體弱減少坐著時間並請務必和專業醫師或護理人員聯繫坐在此座墊的白使用時間。
- 無論坐在輪椅或椅子，使用時務必確保穩定支撐在輪椅腳輪板上，腳架，或地板。

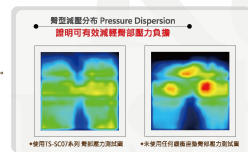

型號	產品尺寸	包裝尺寸	重量
TS-SC07-4040	16" x 16" x 2.75" (40x40x7cm)	40x38x12.6cm	約 2.0 Kg
TS-SC07-4540	18" x 16" x 2.75" (45x40x7cm)	45x38x12.6cm	約 2.3 Kg

- 座墊本體 (含:蜂巢式固態凝膠/高密度透氣泡棉底座)
- 專用座罩 (PU Coating防水透氣布/透氣網布/止滑底)
- 最大載重:100 Kg (公斤)
- 僅保固座墊本體於購買後正常使用下之服務為期兩年。



製造商名稱: 淳碩科技股份有限公司 服務專線: 0800-820168
製造商地址: 新北市新店區民權路130巷3號4樓 www.medical-truesource.com.tw



經銷商